

## 使用方法

- 袋を強くたたき、中の水袋を破ってください。破れると内容物が溶けて急速に冷却が始まり、すぐ使用できます。細長い形状のため、左右に傾けながら水分が均等に行き渡るようにしてください。袋を何回も振ると、冷却時間が短くなります。
- 平らなところにおいてたたくと、水袋は破れやすくなります。
- 保冷時間はご使用状況により異なりますが、室温27°Cで約30分です。

## 使用上の注意

- 温度が急激に下がりますので、身体に使用される際は必ずタオルなどに包んでから、ご使用ください。(直接肌につけると凍傷のおそれがございますので、乳幼児、皮膚の弱い方へのご使用には十分ご注意ください。)また、長時間同じ部位での使用はしないでください。
- 直射日光や湿気が多い場所には保存しないでください。
- 火気や暖房器具には近づけないでください。火災の原因となります。
- 本製品は絶対に開封しないでください。破損したり、漏れが生じた場合には使用しないでください。
- 本製品を握る際、力を入れすぎると袋が破れるおそれがありますのでご注意ください。
- 万一、本製品が破れた場合、すみやかに使用を中止し破棄してください。
- 袋の上に重い物を乗せたり、バッグの中等で袋に強い力が加わらないようにご注意ください。使用済みの状態になるおそれがございます。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。廃棄の際も、本製品は開封しないでください。
- お子さまの手の届かないところへ保管してください。
- 保冷時間は環境により異なります。
- 本製品は冷却バックです。用途以外には使用しないでください。
- 本製品は保冷専用です。加熱などのご使用はおやめください。

## 品質表示

品名	瞬間冷却剤ネックタイプ
品番	LCACL004
寸法(約)	480×60×20mm
内容量(約)	200g
内容物	尿素・水
セット内容	瞬間冷却剤×3個

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。  
※実物と印刷とでは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。  
※食べられません。

**ご使用の後は、  
冷凍庫で凍らせて頂く事により通常の保冷剤としてもご使用頂けます。**

ライフオンプロダクツ株式会社 カスタマーサポートセンター  
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、弊社休業日を除く)  
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MADE IN CHINA

Copyright Life on Products, Inc. All rights reserved. Designed in Japan.