


暮らし、イロドル



Life on Products

Refeelin'

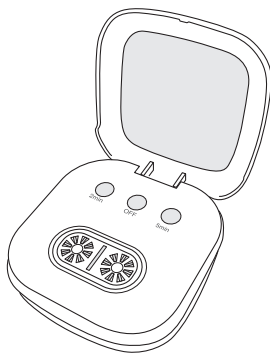

GF-HE001 取扱説明書

コンタクトレンズ専用
超音波洗浄機


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	セット内容と各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3~4 ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	5 ページ
	保管場所	5 ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	6 ページ
	アフターサービス	7 ページ
	カスタマーサポートセンター	8 ページ
	仕様	9 ページ
	保証書	裏表紙


セット内容と各部名称

<超音波洗浄機>


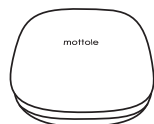


本体背面


マイクロUSB差込口

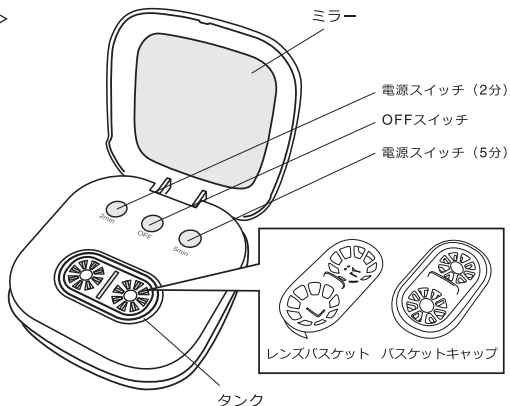

<コンタクトケースセット>

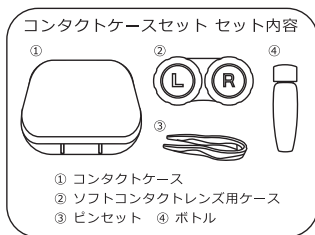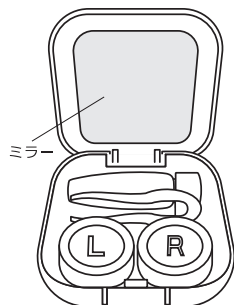

<付属品>

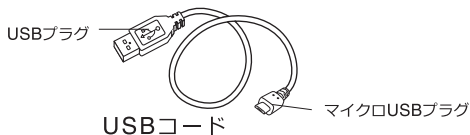












安全上のご注意

必ずお守りください

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
 注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。		
絵表示の例 	このような表示は禁止を示します。		このような表示は強制を示します。

 警告	
<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</p>  <p>発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。</p> <p>改造禁止</p>	<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p>  <p>本体内部に水が入り込み、火災・感電やショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>USBコードを傷つけないでください。</p>  <p>加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災や感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>付属のUSBコード以外は使用しないでください。</p>  <p>火災や感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>本製品はコンタクトレンズ専用の洗浄機です。他の物の洗浄に使用しないでください。</p>  <p>故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>ケースから水が溢れ出たらすぐに電源を切ってください。</p>  <p>故障や感電の原因となります。</p> <p>強制</p>

⚠ 注意

<p>お子様の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけで使用させないでください。</p> <p> 怪我や事故のおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。</p> <p> 故障や破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>風呂場や湿気の多い環境で使用しないでください。</p> <p> 故障や感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>傷んだコードは使用しないでください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 怪我や破損のおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。</p> <p> 落下による破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>過度な衝撃や振動をあたえないでください。</p> <p> 破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>暖房器具や調理台の近くなど、油、熱、蒸気の当たる場所に置かないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。</p> <p> 変色したり変形するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。</p> <p> 感電や怪我をするおそれがあります。</p> <p>強制</p>
<p>洗浄液を入れないまま製品を起動しないでください。</p> <p> 異常過熱し、故障ややけどの原因となります。</p> <p>禁止</p>	

コンタクトレンズの破損、不具合が生じてもその責任は負いかねます。

ご使用方法

1. 手をきれいに洗ってから超音波洗浄機のふたを開け、レンズバスケットを取り出します。
レンズバスケットはぬるま湯や水で洗浄し、タンクは固く絞った清潔な布で拭いてください。
2. レンズバスケットをタンクに戻し、コンタクトレンズ専用の洗浄液や精製水を入れてください。
※バスケットが洗浄液に浸かるまで入れてください。
それ以上入れますと、溢れて故障の原因となるおそれがあります。
※付属のボトルには洗浄液を肩口以上入れないでください。
3. 洗浄するコンタクトレンズを左右間違いの無いようにレンズバスケットに入れ、バスケットキャップでふたをしてください。
4. 超音波洗浄機背面のマイクロ USB 差込口に USB コードのマイクロ USB プラグを差し込み、USB プラグをお手持ちの USB アダプター、またはパソコンの USB 差込口に差してください。
5. 電源スイッチ (2分) または電源スイッチ (5分) を押すとスイッチ上部が赤く光り、洗浄が始まります。
電源スイッチに書かれた時間で自動で止まり洗浄が完了です。
途中で止めたい時は OFF スイッチを押すと止まります。
6. USB コードを抜いてバスケットキャップを開け、コンタクトレンズを取り出してください。
7. タンクからレンズバスケットを取り出し、洗浄液がスイッチにかからないように手前側に排水してください。
8. 清潔な布でタンク内の水分を拭き取り、水でよく洗ったバスケットキャップとレンズバスケットをタンク内に戻してください。

保管場所

- ・直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

故障かな？

症状	調べるところ	対処方法
動かない	USBコードが抜けている	USBコードを差してください

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼される時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	GF-HE001
電源	USB 5V
電源コード(約)	USBコード：915mm
周波数	60KHz
消費電力(約)	3W
オフタイマー	標準モード：2分、しっかりモード：5分
サイズ(約)	80×80×38mm
重量(約)	91g
セット内容	本体、コンタクトケースセット(ソフトコンタクトレンズ用ケース、ボトル、ピンセット)、USBコード、取扱説明書(保証書付)

※ 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products